

EarWash – Sistema de extracción de cerumen



medica sa.

<http://www.abmedic.com>

<http://www.abmedica.es>



ACCION HYDROVAC

VENTAJAS - Extraiga el cerumen sin complicaciones

FACIL de UTILIZAR: Extramadamente sencillo de aprender.

LIMPIO: la Acción de Hydrovac irriga simultáneamente la oreja mientras el exceso de agua succiona y descarga lejos de usted y de su paciente, reduciendo el flujo de desagüe.

SEGURO: el Producto es regulado automáticamente por la por la presión del agua. Una alarma visual nos indica cuando la temperatura es ideal. Si el agua llega a ser demasiado caliente, se activa la válvula automática.

EFFECTIVO: Coloque l funda de la sonda, tire de la oreja para sellar el canal auditivo; la presión aumenta y el cerumen se extrae a través del tubo, transparente que permite observa los restos de cerumen.

PORTÁTIL E INDEPENDIENTE: Rápida conexión y desconexión de un grifo estándar (no se requiere electricidad ni baterías).

ALTA SATISFACCION DEL PACIENTE: Pacientes de todas las edades apreciarán la seguridad, el confort y la limpieza durante su uso.

Cómo utilizarlo

<p>PASO1. Realizar el examen con otoscopio</p>	<p>PASO 2. El paciente utiliza unas gotas para reblandecer el tapó de cera. (dependiendo del criterio médico)</p>	<p>PASO 3. Realice la conexión del tubo de agua, en la parte lateral del equipo</p>
		
<p>PASO 4. Conecte la parte superior del equipo, al grifo, presionando la anilla blanca hacia abajo.</p>	<p>PASO 5. Presione la funda de la sonda firmemente.</p>	<p>PASO 6. Regule la temperatura del agua hasta alcanzar los 90°. Cuando la temperatura, sea correcta el indicador cambiará de azul a BLANCO. Es el momento de realizar la limpieza del canal.</p>
		
<p>PASO 7. El profesional sanitario, con formación necesaria en este procedimiento, puede realizar este paso. Estire la parte superior de la oreja e introduzca la parte de la sonda.</p>	<p>PASO 8. Con la parte de la oreja sostenida, comience al irrigar el canal. El cerumen, saldrá a través del tubo transparente.</p>	<p>PASO 9. Durante la irrigación pregunte al paciente, si se siente correctamente o tiene algún tipo de molestia. Compruebe el color el indicador de temperatura</p>
		
<p>PASO 10. Una vez realizada la irrigación, deseche la funda de la sonda</p>	<div data-bbox="911 1599 1126 1805" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 1827 1310 1980" data-label="Text"> <p>http://www.abmedic.com o http://www.abmedica.es Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA Telf. 932541540 Fax 934185140 Rodriguez San Pedro 41 • 28015 MADRID Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578</p> </div>	
		